

# MEM-X



MODE D'EMPLOI

# MEM-X

L'agenda qui parle

Vous venez d'acquérir un agenda vocal **MEM-X** et nous vous en remercions. Afin que cet appareil vous donne entière satisfaction prenez le temps de lire cette notice d'utilisation.

## A QUOI SERT LE MEM-X ?

### MEM-X est l'appareil le plus simple pour venir au secours de la mémoire qui parfois...

- est défaillante chez les personnes âgées qui peuvent oublier ce qu'ils doivent faire, d'aller à un rendez-vous, de prendre leurs médicaments.
- a besoin d'une aide, surtout pour les personnes surchargées de travail, d'obligations, de responsabilités
- est volontiers négligée chez l'enfant momentanément seul à la maison qui a tendance à oublier, devant la télévision, les consignes de ses parents...

### MEM-X vient rappeler à son utilisateur ce qu'il doit accomplir immédiatement

- en délivrant un message vocal enregistré

### Et cela grâce à un principe de fonctionnement simple

- quand le MEM-X sonne, quelque chose d'important doit être fait
- en appuyant sur le bouton bleu, le MEM-X nous dit quoi faire

### Combiné à des solutions multiples...

- les messages sont programmés. La date et l'heure du passage de chaque message sont donc fixées.
- Le MEM-X permet de programmer plusieurs mois à l'avance jusqu'à 70 messages de 10 secondes

## UTILISATION DU MEM-X

### LE MEM-X PRESENTE DEUX FACES :

Une face est destinée au programmeur, celui qui configure le MEM-X et les messages.


L'autre face est destinée à l'utilisateur, celui qui écoute les messages.

### La face « programmeur »


Le programmeur peut être l'utilisateur lui-même ou une tierce personne comme un soignant, un membre de la famille pour les personnes âgées, une secrétaire pour les hommes d'affaire ou encore les parents pour l'enfant.

### Présentation

Cette face est composée d'un microphone et d'un clapet qui s'ouvre en appuyant sur le verrou. Sous le clapet se trouvent un écran LCD ainsi que le clavier nécessaire à la configuration du MEM-X, et à la programmation des messages. L'ouverture du clapet permet aussi d'accéder au compartiment pile (pile AAA dont la durée de vie, en utilisation normale, est d'un mois minimum).

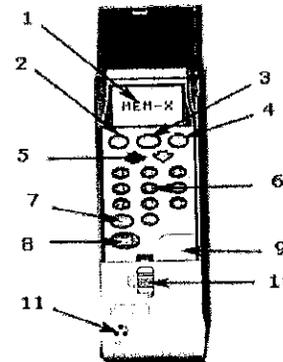

1. Afficheur LCD
2. Touche Exit
3. Touche Menu
4. Touche Ok
5. Flèches de Navigation
6. Clavier digital
7. Touche SOS
8. Touche REC: pour enregistrer
9. Trappe à pile
10. Verrou du clapet
11. Microphone

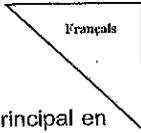

### **Utilisation**

A tout moment on peut annuler les opérations et retourner au menu principal en appuyant sur la touche EXIT (2).

L'appui sur la touche « flèche en haut » renvoie systématiquement vers l'écran précédent.

L'écran s'éteint automatiquement au bout d'une minute si aucune opération n'est faite.

#### **1) Mise en marche de l'appareil**

Appuyer 3 secondes sur la touche MENU (3) pour activer le MEM-X.

L'écran s'allume et affiche:

- la date et l'heure
- l'état de chargement de la pile

#### **2) Composition du Menu**

Allumer le MEM-X

Appuyer sur la touche MENU (3) pour accéder au menu principal

Faire dérouler le menu à l'aide des flèches de défilement (5)


Le menu principal est composé de:

- « Nouv Message ? » pour programmer un message
- « Message Liste ? » pour accéder à la liste des messages
- « Régler Date ? » pour configurer la date et l'heure
- « SOS Message ? » pour le message SOS – message d'urgence
- « Voix Volume ? » pour configurer le niveau sonore des messages
- « Sonnerie Volume ? » pour configurer le niveau sonore de l'alarme
- « Sonnerie Mélodie ? » pour configurer la mélodie de l'alarme
- « Format Heure » pour configurer le format d'affichage de l'heure
- « Format Date » pour configurer le format d'affichage de la date
- « Choisir langue ? » pour choisir la langue du menu
- « Bip clavier ? » pour activer la répétition sonore des touches

Pour la première mise en service du MEM-X, aller directement au menu « Select language/choisir langue ? » pour sélectionner le Français, puis sur « Régler Date » afin de configurer date et heure.

#### **3) Configuration**

Rentrer dans le menu principal en appuyant sur la touche MENU (3)  
Atteindre « Select Language/Choisir langue ? » à l'aide des flèches (5) et appuyer sur OK (4) « language English » apparait à l'écran, aller jusqu'à « Langue Français » grâce à la flèche en bas, appuyer sur OK (4)

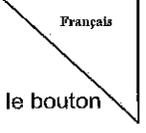

Atteindre « Régler Date ? » à l'aide des flèches (5) et appuyer sur le bouton OK (4) la date par défaut apparait à l'écran

Rentrer directement la date : jour/ mois/ année à l'aide du clavier numérique (6). (Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)

Appuyer sur la touche OK (4) pour valider (ou appuyer sur « MENU » pour effacer les données et recommencer)

« Heure » apparait à l'écran

Rentrer directement l'heure à l'aide du clavier numérique (6).

(Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)

Appuyez sur la touche OK (4) pour valider

La date et l'heure sont configurées

L'écran retourne à l'affichage de la date et de l'heure avec les nouvelles données

Appliquez le même processus pour les changements d'heure.

NB :

-Par défaut le format d'affichage de l'heure est sur 24 heures et le format de la date est jour/ mois/ année. Lire les instructions **10** et **11** de ce manuel si vous désirez changer les formats d'affichage.

-Les données ne peuvent être validées si elles ne correspondent pas au bon format. Il faut alors recommencer la saisie.

#### **4) Programmation d'un message**

MEM-X permet de programmer 3 types de message :

- Des messages uniques
- Des messages quotidiens pendant une semaine, deux semaines, un mois ou trois mois
- Des messages hebdomadaires

##### **Messages uniques**

Accéder au menu principal et atteindre « Nouv Message ? »

Appuyer sur la touche OK (4)

« Date » suivit de la date du jour apparaissent à l'écran

Rentrer alors la date voulue pour le message à l'aide du clavier numérique (6) (Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)

Appuyer sur la touche OK (4)

« Heure » suivit de l'heure actuelle apparaissent à l'écran

Rentrer l'heure voulue pour l'alerte du message à l'aide du clavier numérique (6) (Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)

Appuyer sur la touche OK (4)

« SVP Press REC » apparait à l'écran

Français

Appuyer sur la touche REC (8) pour commencer l'enregistrement du message vocal et maintenir appuyé le temps de l'enregistrement  
« REC » clignote en haut à gauche de l'écran et « Reste » ainsi qu'un compteur de temps apparaissent pour indiquer l'espace disponible  
Relâcher le bouton REC (8) pour arrêter l'enregistrement  
Une réécoute du message est alors enclenchée automatiquement  
Une fois la réécoute finie, l'affichage retourne au Menu « Nouv Message » et le message est stocké

#### Messages quotidiens

Accéder au menu principal et atteindre « Nouv Message ? »  
Appuyer sur la touche OK (4)  
« Date » suivi de la date du jour apparaissent à l'écran  
Accéder aux différentes périodes de répétition du message quotidien à l'aide des flèches de défilement (5)  
« Durée » suivi de « 1 Sem », « 3 Sem », « 1 Mois » et « 3 Mois » apparaissent successivement à l'écran  
Sélectionner la durée souhaitée en appuyant sur la touche OK (4) lorsqu'elle apparaît à l'écran  
« Heure » suivi de l'heure actuelle apparaissent à l'écran  
Rentrer l'heure de répétition quotidienne d'alerte du message à l'aide du clavier numérique (6) ex : « 09 :30 » (Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)  
Appuyer sur la touche OK (4)  
« SVP Press REC » apparaît à l'écran  
Appuyer sur la touche REC (8) pour commencer l'enregistrement du message vocal et maintenir appuyé le temps de l'enregistrement  
« REC » clignote en haut à gauche de l'écran et « Reste » ainsi qu'un compteur de temps apparaissent pour indiquer l'espace disponible  
Relâcher le bouton REC (8) pour arrêter l'enregistrement  
Une réécoute du message est alors enclenchée automatiquement  
Une fois la réécoute finie, l'affichage retourne au Menu « Nouv Message » et le message est stocké

#### Messages Hebdomadaires

Accéder au menu principal et atteindre « Nouv Message ? »  
Appuyer sur la touche OK (4)  
« Date » suivi de la date du jour apparaissent à l'écran  
Accéder au jour de la semaine désiré à l'aide des flèches de défilement (5)  
« Chaque » suivi de « Dimanche », « Lundi », « Mardi », « Mercredi », « Jeudi », « Vendredi » et « Samedi » apparaissent successivement à l'écran  
Appuyer sur la touche OK (4) pour sélectionner le jour  
« Heure » suivi de l'heure actuelle apparaissent

Français

Rentrer l'heure voulue à l'aide du clavier numérique (6) (Nb : le retour en arrière est possible grâce aux flèches)

Appuyer sur la touche OK (4)

« SVP Press REC » apparaît à l'écran

Appuyer sur la touche REC (8) pour commencer l'enregistrement du message vocal et maintenir appuyé le temps de l'enregistrement  
« REC » clignote en haut à gauche de l'écran et « Reste » ainsi qu'un compteur de temps apparaissent pour indiquer l'espace disponible  
Relâcher le bouton REC (8) pour arrêter l'enregistrement  
Une réécoute du message est alors enclenchée automatiquement  
Une fois la réécoute finie, l'affichage retourne au Menu « Nouv Message » et le message est stocké  
Ce type de message ne pourra être effacé que manuellement

NB:

La durée des messages est limitée à 59 secondes maximum.  
Dans le cas où la minute demandée est déjà occupée par un message, l'affichage clignote puis revient à l'heure actuelle.

#### 5) Gestion des Messages Enregistrés

Cette option du menu permet d'accéder à la liste des messages programmés et de les gérer (écouter, effacer, remplacer).

#### Stockage des messages

Accéder au menu principal

Atteindre « Message Liste ? » et appuyer sur la touche OK (4)  
Apparaissent alors à l'écran un compteur de message, le type de message, l'heure d'alerte ainsi que la date, la durée ou le jour de la semaine du message

A l'aide des flèches (5) on fait défiler les messages par catégorie : « DATE » pour les messages uniques, « SEMAINE » pour les messages quotidiens, « JOUR » pour les messages hebdomadaires  
Chaque catégorie possède son propre compteur de message  
Le défilement commence avec les messages uniques, puis les messages quotidiens, enfin les messages hebdomadaires

#### Gestion des messages

Atteindre le message désiré puis appuyer sur OK (4)

faire défiler le menu de gestion du message à l'aide des flèches (5) et:  
-Écouter le message. Pour cela atteindre « Ecouter » et appuyer sur OK (4)  
le message est entendu

une fois l'écoute terminée, l'affichage retourne dans le menu de gestion des messages

-Effacer le message. Pour cela atteindre « Effacer » et appuyer sur OK (4), une fois le message effacé, l'affichage retourne dans le menu de gestion des messages

-Remplacer le message. Pour cela atteindre « Remplacer » et appuyer sur OK (4)

Il faut alors renouveler l'enregistrement en effectuant la même opération que lors du premier enregistrement. Une fois le message remplacé, une réécoute automatique précède le retour de l'affichage au menu de gestion du message

## 6) Message SOS – Message d'urgence

### Explication

Une option du menu général permet d'enregistrer un message d'urgence. Ce message a pour but de renseigner une tierce personne en cas d'accident du possesseur de l'appareil : accident de voie publique, perte de conscience ou de mémoire...

### Enregistrement du message

Accéder au menu principal

Atteindre « SOS Message ? » et appuyer sur OK (4)

Lorsqu' aucun message d'urgence n'est enregistré, l'écran affiche « SOS Mess Enreg ? »

Appuyer sur OK (4)

« SVP Press REC » apparaît à l'écran

Appuyer sur la touche REC (8) pour commencer l'enregistrement du message vocal et maintenir appuyé le temps de l'enregistrement

« REC » clignote en haut à gauche de l'écran et « Reste » ainsi qu'un compteur de temps apparaissent pour indiquer l'espace disponible

Relâcher le bouton REC (8) pour arrêter l'enregistrement

L'appareil lance une réécoute automatique, puis l'affichage retourne au menu de gestion du message d'urgence (écouter, effacer, remplacer)

### Gestion du message d'urgence

Accéder au menu principal

Atteindre « SOS Message ? » et appuyer sur OK (4)

On entre alors dans le menu de gestion du message

L'écran affiche « SOS Mess Ecoute ? »,

Faire défiler le menu à l'aide des flèches (5) et :

-Ecouter le message. Pour cela atteindre « Ecoute » et appuyer sur OK (4)

le message est diffusé, une fois l'écoute terminée, l'affichage retourne au menu de gestion

-Effacer le message. Pour cela atteindre « Efface » et appuyer sur OK (4)

Une fois le message effacé, l'affichage retourne au menu du message d'urgence et apparaît « SOS Mess Enreg ? » pour enregistrer un nouveau message d'urgence

-Remplacer le message. Pour cela atteindre « Remplace » et appuyer sur OK (4)

Renouveler l'enregistrement en effectuant la même opération que lors du premier enregistrement. Une fois le message remplacé, l'appareil effectue une réécoute automatique, puis l'affichage retourne au menu de gestion du message.

### Utilisation du message

Le message peut être entendu à tout moment

Appuyer sur la touche SOS (7) pour activer le message.

## 7) Volume des messages

MEM-X propose de régler le niveau sonore des messages sur une échelle de 1 à 8

Accéder au menu principal

Atteindre « Voix Vol ? » et appuyer sur OK (4)

« Voix Vol Niv [\*] » apparaît à l'écran. \* correspond au volume actuel allant de 1 à 8

Régler alors le volume entre 1 et 8 à l'aide des flèches de défilement (5)

Appuyer sur OK (4) pour valider

L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure

## 8) Volume de l'alarme

MEM-X propose de régler le niveau sonore de l'alarme sur une échelle de 1 à 8

Accéder au menu principal

Atteindre « Sonnerie Volume ? » et appuyer sur OK (4)


« Sonn Vol Niv [\*] » apparaît à l'écran. \* correspond au volume actuel allant de 1 à 8

Régler alors le volume entre 1 et 8 à l'aide des flèches de défilement (5)

Lorsqu'on modifie le volume, l'alarme est entendue avec le nouveau niveau sonore

Appuyer sur OK (4) pour valider

L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure

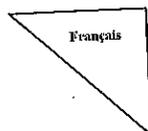

### 9) Mélodie de l'alarme


MEM-X propose un choix de 5 mélodies différentes pour l'alarme  
Accéder au menu principal  
Atteindre « Sonnerie Mélodie ? » et appuyer sur OK (4)  
«Mélodie [\*] » apparaît à l'écran. \* correspond au numéro de la sonnerie  
Faire défiler les différentes mélodies à l'aide des flèches de défilement (5),  
les sonneries sont entendues  
Appuyer sur la touche OK (4) pour valider une des mélodies  
L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure

### 10) Format d'affichage de l'heure

Le MEM-X propose les deux formats d'affichage de l'heure : en 12 heures  
ou en 24 heures.  
Le message « Heure sur 24H » correspond à un format d'affichage en 24  
heures.  
Le message « Heure sur 12H » correspond à un format d'affichage en 12  
heures.  
Accéder au menu principal  
Atteindre « Format Heure » et appuyer sur OK (4)  
Le format actuel « Heure sur 24H » ou « Heure sur 12H » apparaît à l'écran  
Appuyer sur OK (4) pour garder ce format.  
L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure  
Sinon appuyer sur une flèche de défilement (5)  
L'autre format « Heure sur 12H » ou « Heure sur 24H » est proposé  
Appuyer sur OK (4) pour valider le nouveau format  
L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure

### 11) Format d'affichage de la Date

Le MEM-X propose deux formats d'affichage de la date : Jour/ Mois/ Année  
ou Mois/ Jour/ Année.  
Le message « Date en JJ/ MM' AA » correspond à un format d'affichage  
Jour/ Mois/Année. Le message « Date en MM/ JJ' AA » correspond à un  
format d'affichage Mois/ Jour/ Année.  
Accéder au menu principal  
Atteindre « Format Date » et appuyer sur OK (4)  
Le format actuel « Date en JJ/ MM' AA » ou « Date en MM/ JJ' AA »  
apparaît à l'écran  
Appuyer sur OK (4) pour garder ce format

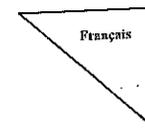

L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure  
Sinon appuyer sur une flèche de défilement (5)  
L'autre format « Date en MM/JJ' AA » ou « Date en JJ/ MM' AA » est  
proposé  
Appuyer sur OK (4) pour valider le nouveau format  
L'écran retourne à l'affichage initial de la date et de l'heure

### 12) Sélection de la langue


Les menus de MEM-X peuvent être affichés en deux langues (Anglais &  
Français pour la version en votre possession).  
Aller à « Select language ? » cliquer sur la touche OK (4)  
« Language English » s'affiche, appuyer sur la flèche vers le bas (5) pour le  
Français  
« Langue Français » s'affiche, appuyer sur la touche OK (4) si le Français  
est la langue choisie.

### 13) Bips clavier

L'appui sur les touches du clavier peut générer un son à la demande  
Aller à « Bip touches ? » cliquer sur OK (4)  
« ON » s'affiche, cliquer sur OK (4) pour valider ou sur flèche en bas  
« OFF » s'affiche, cliquer sur OK (4) pour valider

**La face « utilisateur »****Présentation**

C'est la plus simple et elle est seulement composée d'une touche bleue (1), d'un haut-parleur (2) et d'une sortie audio pour casque (3).

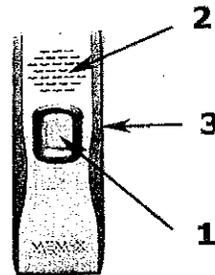**Utilisation**

Lorsque la date et l'heure d'un message enregistré arrivent, le MEM-X sonne. L'utilisateur doit alors appuyer sur le bouton bleu (1) pour arrêter l'alarme et écouter le message. Le message peut être écouté soit par le haut-parleur (2), soit dans un casque ou une oreillette branchés dans la sortie audio (3). Le message peut être réécouté autant de fois que l'utilisateur le désire jusqu'au message suivant.

**Attention:**

Lorsque l'indicateur de charge figurant en haut à gauche de l'afficheur LCD présente un rectangle vide, la pile est déchargée et doit être changée immédiatement. L'appareil émet alors un signal court, l'indicateur clignote, puis l'appareil s'éteint complètement de façon à éviter tout dysfonctionnement.