

Otros productos de la gama de NRS Healthcare que le pueden interesar en combinación con este:

L35324: Tapete antideslizante Dycem



Instrucciones de Uso M66832 Mesita basculante regulable para cama o silla

Advertencia general de seguridad

Lea y siga estas instrucciones minuciosamente, ya que su incumplimiento podría causar lesiones al usuario. Guarde las instrucciones en un lugar seguro

1.0 Uso Indicado

Esta elegante y versátil mesa se puede utilizar sobre sillas o camas individuales. Dispone de cuatro ruedecillas que facilitan su manejo y posicionamiento. La altura se puede ajustar entre 700 mm y 900 mm, y la anchura entre 900 mm y 1100 mm. El tablero de la mesita se puede inclinar y fijar en cualquier ángulo, hasta una inclinación máxima de 55°, mediante un pistón a gas de control manual. La mesa incluye dos mesitas auxiliares a los lados que permanecen siempre en posición horizontal; esto permite al usuario inclinar el tablero central y utilizar las mesitas laterales para colocar objetos, por ejemplo, un refresco. Las mesitas auxiliares se pueden desmontar si no se necesitan. Todas las superficies son fáciles de limpiar.



2.0 Desempaquetado

- Este producto se proporciona desmontado, por lo que, antes de utilizarlo, es necesario ensamblarlo.
- No se necesitan herramientas.
- Extraiga el producto de su embalaje y compruebe que no existen daños. Si observa cualquier daño o sospecha que tiene algún defecto, no ensamble el producto y póngase inmediatamente en contacto con su proveedor.
- Compruebe que se incluyen todas las piezas (ver el contenido al dorso).

La mesita basculante regulable para cama o silla y el tapete antideslizante Dycem forman parte de una gama de más de 3000 productos de apoyo para la vida diaria disponibles a través de NRS Healthcare.

Para ver la gama completa, visite nuestro sitio web, **www.nrshealthcare.co.uk**, o solicite un catálogo en el número indicado abajo.

NRS Healthcare, Sherwood House, Cartwright Way,
Forest Business Park, Bardon Hill, Coalville
Leicestershire, LE67 1UB (Reino Unido)

Tel. oficina principal: 0330 100 0098

Tel. Servicio de atención al cliente: 0345 121 8111

Email: customerservice@nrshealthcare.co.uk

NRS Healthcare es un proveedor destacado de equipos colectivos y de asistencia para la vida diaria. Si desea consultar nuestra gama completa de productos, visite el sitio web:

www.nrshealthcare.co.uk

UI/M66832/02/17/Iss4


Índice	
Descripción	Cantidad
Conjunto del tablero	1
Mesita auxiliar	2
Escuadra de ajuste	2
Rueda de ajuste (tornillo de bloqueo)	4
Conjunto de las patas	2

3.0 Medidas de Seguridad

- No sobrecargue el tablero de la mesa; el peso máximo que puede soportar es de 15 kg con el tablero en posición horizontal.
- No utilice la mesa para transportar objetos.
- Es aconsejable bloquear las ruedecillas antes de utilizar la mesa.
- Antes de subir o bajar el tablero de la mesita, asegúrese de retirar cualquier objeto que pueda obstaculizar la tarea.


4.0 Instrucciones de Montaje

- 1 - Coloque el tablero en el suelo bocabajo, como se indica en el diagrama 1.
- 2 - Deslice el extremo más corto de la escuadra de ajuste en la barra central del tablero de la mesa hasta lograr la anchura requerida. A continuación, alinee los agujeros de las dos piezas y fíjelas mediante la rueda de ajuste (ver el diagrama 1).

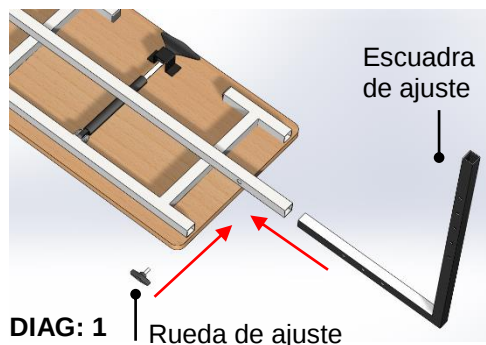

- 3 - Repita el paso dos en el otro lado de la mesa.


- 4 - Acople la estructura de la pata a la escuadra de ajuste, deslizándola hasta lograr la altura adecuada. Alinee los agujeros y fije las piezas mediante la rueda de ajuste (ver el diagrama 2).

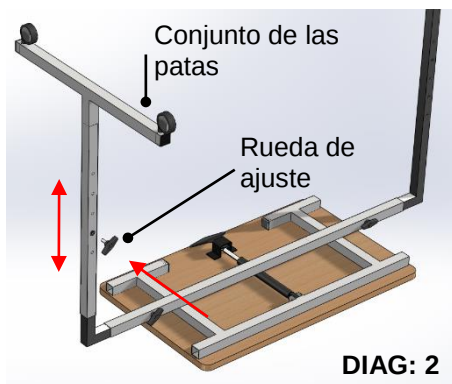

- 5 - Repita el paso cuatro con la otra pata.


- 6 - Dé la vuelta al tablero de la mesa y bloquee las ruedecillas.

- 7 - Instale las mesitas auxiliares insertando los tubos rectangulares en los tubos correspondientes del tablero. Al introducirlos, presione sobre las horquillas de sujeción para bajarlas, y empuje hasta que encajen perfectamente (ver los diagramas 3 y 4).

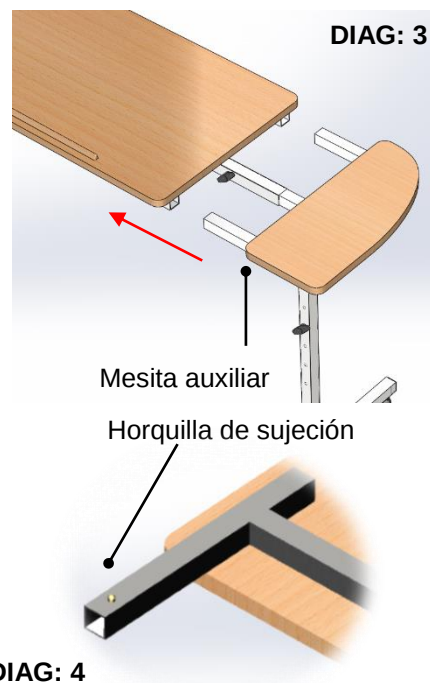

5.0 Instrucciones de Uso

Para inclinar el tablero, presione la manivela hacia la parte inferior de la mesa y suba o baje el tablero. Para bloquear el tablero en una posición, suelte la manivela (ver el diagrama 5).

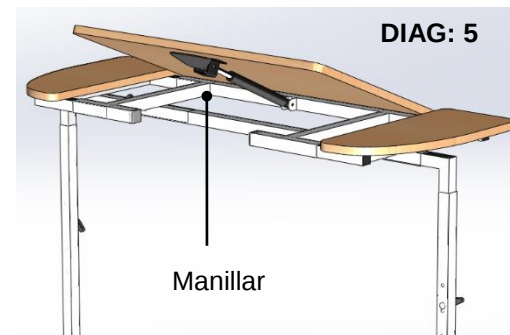

6.0 Limpieza

- Límpiase con asiduidad utilizando un paño suave y un detergente o una solución desinfectante suave.
- No utilice productos abrasivos.

7.0 Cuidado y Mantenimiento

Compruebe con asiduidad la estabilidad y solidez del producto, y asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados y se encuentran en buen estado.