


# 8170 4060

Ryggstöd Relax duschsits

Backrest Relax shower seat

Rückenlehne für Duschklapposit Relax

Rugleuning Relax douchezitting

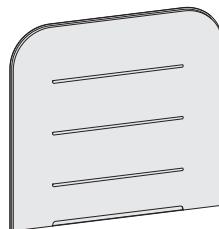


x1

78552B 2013-10-21


1

- SV** Rengör underlaget där ryggstödet ska sitta från fett, damm, smuts och fukt.
- EN** Clean off any grease, dust, dirt and moisture from the surface where the backrest is to be fitted.
- DE** Säubern Sie den Bereich, wo die Rückenlehne angebracht werden soll, von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Fett.
- NL** Verwijder vet, stof, vuil en vocht van het oppervlak waar de rugleuning moet worden gemonteerd.

2

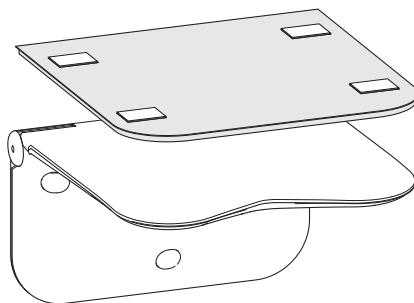

3

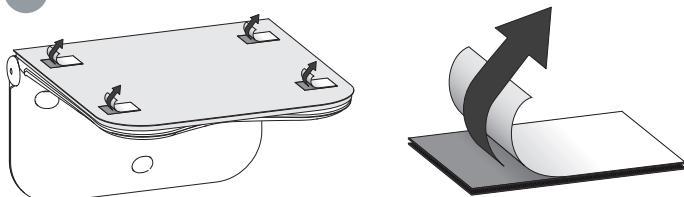


- SV** Optimal vidhäftning erhåller man när limytan resp. underlaget har en temperatur av minst 20°C. Dessutom är det viktigt att man använder hårt tryck vid appliceringen

- EN** Best adhesion is obtained when the glue area and the fitting surface have a temperature of at least 20°C. It is also important to apply large pressure when fitting the backrest.


- DE** Die beste Haftkraft erzielen Sie, wenn Klebefläche und das zu befestigende Teil eine Mindesttemperatur von 20 °C haben. Es ist des Weiteren wichtig, beim Anbringen der Rückenlehne starken Druck auf die Klebeflächen auszuüben.

- NL** Het te lijmen gebied en het montageoppervlak moeten voor de beste hechting een temperatuur van minimaal 20 °C hebben. Het is ook belangrijk om grote druk uit te oefenen bij het monteren van de rugleuning.

4

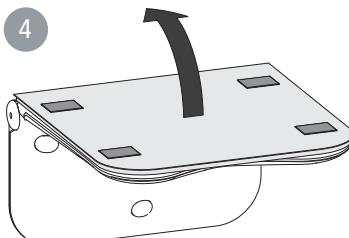

5

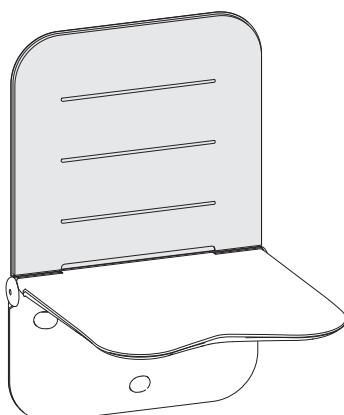

- SV** Eftersom limmet behöver tid att fästa ordentligt i underlaget, skall belastning av ryggstödet ske tidigast efter 60 minuter.

- EN** As the glue requires time to stick properly to the surface, it is not permitted to put any loads on the backrest until 60 minutes have elapsed.

- DE** Der Kleber haftet erst nach einer gewissen Zeit voll an der Oberfläche, daher dürfen Sie die Rückenlehne erst nach 60 Minuten beladen.

- NL** De lijm heeft tijd nodig om aan het oppervlak te hechten; daarom mag er pas 60 minuten na het aanbrengen van de lijm belasting op de rugleuning worden geplaatst.

Etac

Box 203, 334 24 Anderstorp  
Sweden  
Tel +46 371 58 73 00  
Fax +46 371 58 73 90  
www.etac.com

