



Reumatikerpenna
Pen for Rheumatics
Reumatikerschreiber

Att skriva med reumatikerpennan kan kännas ovanligt.
Därför är det viktigt att du från början håller pennan rätt.

Writing with this pen may feel unfamiliar, so it is vital that
you learn to hold the pen correctly right from the start.

Das Schreiben mit dem Reumatikerschreiber kann als
unnatürlich empfunden werden. Deshalb ist es wichtig,
dass Sie den Schreiber von Anfang an richtig halten.

CE

Made in Sweden +46 371 58 73 00

How to use
the pen for Rheumatics.

Correct grip !



Place the underside of the thumb in the hollow in the pen and lay your index finger along the pen. Do not press with your index or middle finger

Incorrect grip !



Avoid a pinching or precision grip, which will rapidly tire your hand.

Wie der Rheumatikerschreiber
angewandt werden soll.

Richtiger Griff !



Plazieren Sie die "Daumenfalte" in die Mulde des Schreibers und legen Sie den Zeigefinger entlang dem Schreiber. Drücken Sie nicht mit dem Zeige- oder Mittelfinger.

Falscher Griff !



Vermeiden Sie den Daumen- Fingerspitzen-Griff / Präzisionsgriff, der eine schnelle Ermüdung Ihrer Hand verursacht.

etac®

Så här använder du
Reumatiker-pennan

Rätt grepp !



Placera tumvecket i pennans grop och lägg pekfingret längs pennan. Tryck inte med pekfingret eller långfingret.

Fel grepp !



Undvik nypgreppet / precisionsgreppet, som fort tröttar ut handen.