

<b>N10699</b>	<b>Fest montierte Armlehnen 550mm breit</b>
<b>N10705</b>	<b>Fest montierte Armlehnen 660mm breit</b>
<b>N10717</b>	<b>Abnehmbare Armlehnen 660mm breit</b>

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie sie. Andernfalls kann für den Benutzer eine Verletzungsgefahr bestehen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

**Maximales  
Benutzergewicht**



## 1.0 Verwendungszweck

Die extra breiten Stühle sind hauptsächlich für den Einsatz als Toilettenstühle vorgesehen. Sie können auch als Sitzhilfe über einer Standardtoilette (ohne Rückenlehne und ohne angebrachten Toilettensitz) und – mit angebrachter Sitzabdeckung – für den gelegentlichen kurzfristigen Gebrauch als Schlafzimmer- oder Duschstuhl verwendet werden. Seitliche Transfers sind mit Modell N10717 (mit abnehmbaren Armlehnen) möglich. Die Sitzhöhe ist bei allen Modellen verstellbar.

## 2.0 Auspacken

Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung und prüfen Sie, dass alle Einzelteile im Lieferumfang enthalten sind (siehe Packungsinhalt unten). Überprüfen Sie, ob die Einzelteile erkennbare Schäden aufweisen. Verwenden Sie im Falle von erkennbaren Schäden bzw. bei Verdacht auf Defekte das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Contents List				
Item	Description	N10699	N10705	N10717
1	Commode Frame	1	1	1
2	Toilet Seat	1	1	1
3	PU Seat Cover	1	1	1
4	Potty	1	1	1
5	Potty Lid	1	1	1
6	Backrest	1	1	1
7	Leg	4	2	2
8	Leg/wheel Assy LH	-	1	1
9	Leg/wheel Assy RH	-	1	1
10	Removable Arm (not shown)	-	-	2
11	Seat Fixing Screw (not shown)	2	2	2
12	Seat Fixing Nut (not shown)	2	2	2
13	Washer (not shown)	2	2	2
14	E- Clip	4	4	8

## 3.0 Montageanleitung

- Bringen Sie die Beine mit den mitgelieferten Klemmschellen am nach oben gerichteten Gestell auf der erforderlichen Höhe an.
  - Montieren Sie bei Modell N10699 alle vier Standbeine. Montieren Sie bei den Modellen N10705 und N10717 zwei Standbeine an einer Seite des Gestells und dann die Beine mit den Laufrollen an der anderen Seite des Gestells (Ausrichtung wie in der Abbildung oben dargestellt). Drehen Sie den Toilettenstuhl wieder auf seine Beine und kontrollieren Sie, dass die Beine gleich hoch sind und das Gestell nicht wackelt.
  - Um den Toilettensitz anzubringen, entfernen Sie zuerst die Kunststoff-Sitzabdeckung an den Scharnieren, um die Befestigungsbohrungen freizulegen.
  - Richten Sie die Befestigungsbohrungen im Sitz auf die Bohrungen im Gestell aus.
  - Stecken Sie jeweils eine Unterlegscheibe auf jede Halteschraube und führen Sie diese dann durch die Bohrungen ein; sichern Sie die Schrauben von der anderen Seite mit den mitgelieferten Muttern. Hinweis: Der Sitz muss sicher angebracht sein, wobei die Muttern jedoch nicht überdreht werden sollten.
  - Rasten Sie Kunststoffabdeckung wieder in die Scharniere ein, sodass die Schrauben abgedeckt sind.
  - Bringen Sie die Rückenlehne in der gewünschten Position an. Tipp: Die Rückenlehne gleitet leichter hinein, wenn beide Rohre gleichzeitig in das Gestell gesteckt werden, bis die Knopfklammer sicher einrastet. Die Rückenlehne hat drei verstellbare Sitztiefen; um die Rückenlehne weiter nach Innen zu verschieben, drücken Sie die Federknöpfe und schieben Sie die Rückenlehne weiter nach vorne.
  - Schieben Sie den Eimer von vorne entlang der Schienen an der Gestellunterseite in den Toilettenstuhl.
  - Legen Sie den Deckel ggf. auf den Eimer.
  - Bringen Sie die PU-Sitzabdeckung am Toilettensitz an.
- Nur Modell N10717**
- Bringen Sie die abnehmbaren Arme mithilfe der mitgelieferten Klemmschellen wie vorstehend abgebildet an.

#### 4.0 Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie das Gestell nur auf ebenem Untergrund auf, damit es nicht wackelt. Alle Kappen müssen jederzeit mit dem Boden in Kontakt bleiben.
- Das maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.
- Es wird empfohlen, von medizinischem Fachpersonal eine Risikobewertung bzgl. des Umfeldes und der Fähigkeiten des Benutzers durchführen zu lassen.
- Kontrollieren Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß und Schäden und verwenden Sie es nicht mehr, wenn solche erkennbar sind bzw. vermutet werden. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Entsorgen Sie den Eimerinhalt stets in einer Toilette oder der Kanalisation.

#### 5.0 Gebrauchsanweisung

- Nur für Modelle N10705 und N10717: Um den Toilettenstuhl richtig zu positionieren, heben Sie ihn an der Armlehne auf die Laufrollen hoch, sodass die Räder mit dem Boden Kontakt haben, und dann schieben Sie ihn in die gewünschte Position.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe für den Benutzer ein, indem Sie die Klemmschellen für die Beine entfernen und dann die Beine auf die erforderliche Höhe schieben. Richten Sie die Bohrungen in den Beinen und am Gestell aufeinander aus und sichern Sie die Beine wieder mit den Klemmschellen. Achten Sie darauf, dass alle Beine gleich hoch eingestellt sind.
- Wenn der Stuhl über einer Toilette verwendet werden soll (siehe nachstehende Abbildung), entfernen Sie die Rückenlehne und achten Sie darauf, dass kein Teil des Toilettenstuhls mit der Toilette in Berührung ist. Möglicherweise müssen Sie auch den vorhandenen WC-Sitz entfernen. Sorgen Sie dafür, dass die Öffnung des Toilettensitzes sich mittig über dem Toilettenbecken befindet.
- Modell N10717 mit entfernbaren Armlehnen: Lösen Sie beide Sicherungs-Klemmschellen an den Armlehnen und ziehen Sie diese vorsichtig nach oben. Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, dass beide Klemmschellen sicher und die Armlehnen stabil angebracht sind.
- Wird der Eimer verwendet, muss dieser von vorne nach hinten eingeschoben werden. Um die Geruchsbelastung zu reduzieren, sollte der Deckel beim Transport angebracht werden.
- Entsorgen Sie den Eimerinhalt stets in einer Toilette oder der Kanalisation.

#### 6.0 Reinigung

- Um das Infektionsrisiko zu senken und den Toilettenstuhl sauber und geruchsfrei zu halten, empfiehlt es sich, Eimer, Sitz und Armlehnen nach jedem Gebrauch mit einem Hygienespray oder -tuch abzuwischen.
- Pfleger und Betreuer sollten bei diesen Arbeiten stets Schutzhandschuhe tragen.

##### **Reinigung des Toiletteneimers**

- Spülen Sie den Eimer nach jedem Gebrauch gründlich und rückstandsfrei mit warmem Wasser und einem neutralen Desinfektionsmittel aus.
- Es empfiehlt sich die Verwendung von Hygienesprays oder -tüchern.

##### **Reinigung des Toilettengestells**

- Reinigen Sie das Gestell regelmäßig – mindestens einmal pro Woche – mit einem neutralen Desinfektionsmittel.
- Das Produkt kann auch professionell bei hoher Temperatur in Gewerbewaschmaschinen gereinigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Teile vor dem erneuten Gebrauch gründlich getrocknet werden.

#### 7.0 Wartung

Kontrollieren Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Verschleiß, Schäden oder möglichen Defekten. Falls solche erkennbar sind oder vermutet werden, ziehen Sie das Produkt unverzüglich aus dem Einsatz und lassen Sie sich von Ihrem Lieferanten beraten.

#### 8.0 Produkt Garantie

Die Garantie von NRS Healthcare für dieses Produkt deckt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum Fehler bei Material und Verarbeitung ab. Von der Garantie ausgenommen sind jedoch zweckentfremdeter Gebrauch, Missbrauch, unerwünschte Eingriffe oder Manipulation von Teilen des Produkts.

Eine Garantie von NRS Healthcare beeinträchtigt Ihre gesetzlich geregelten Rechte nicht.



##### **NRS Healthcare**

Sherwood House, Cartwright Way,  
Forest Business park, Bardon Hill,  
Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, R.-U

Tel. Customer Services: 0345 121 8111

Email: [customerservices@nrshealthcare.co.uk](mailto:customerservices@nrshealthcare.co.uk)

**NRS Healthcare** ist ein führender Anbieter von Hilfsmitteln für den Heimgebrauch und Alltagshilfen. Unsere Website informiert über unser umfassendes Produktsortiment: [www.nrshealthcare.co.uk](http://www.nrshealthcare.co.uk)