

Technische Daten –	Technical Data
Art- Nr . 13082	Art.No. 13085
Durchmesser Sauger – <i>Diameter suction cups:</i>	85 mm
Gesamtlänge – <i>Length over all:</i>	500 mm
Länge Grifffläche – <i>Space for hand:</i>	100 mm
Abstand zur Wand – <i>Distance to wall:</i>	50 mm
Farbe – <i>Colour:</i>	Weiß/orange – <i>white/orange</i>
Gewicht – <i>Weight:</i>	0,5 kg
Material Griff – Material grip:	Kunststoff PP -High-quality plastic PP
Material Saugteller – Material suction cups:	NBR
Material Innere Mechanik – Material inner parts:	VA (stainless steel)
Garantie –	Warranty
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.	<i>24 months from date of purchase.</i>
Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.	<i>Subject to technical alterations.</i>
Stand 05/2011	<i>As per: 05 / 2011</i>



Drive Medical GmbH & Co. KG * Leutkircher Str. 44 * D-88316 Isny / Allgäu
Tel. 0049 (0) 7562-9724-0 * Fax 0049 (0) 7562-9724-25 * mail info@drivemedical.de

Drive Medical Ltd. * Ainley's Industrial Estate; Elland * GB West Yorkshire HX5 9JP
Phone +44 1422-314488 * Fax +44 1422-314489

Gebrauchsanweisung Instructions

Saughaltegriff

Suction Cup Grab Bar

www.drivemedical.de
www.drivemedical.co.uk

Indikation

Für Personen, die wegen reduzierter physischer Funktionen (z.B. Instabilität im Stehen und/oder reduzierter Funktion von Muskeln) nicht im Stande sind, Badewanne oder Dusche für die tägliche persönliche Hygiene ohne Unterstützung zu verwenden.

Indication

Ideal for people who require assistance with showering and/or bathing on a daily basis. Can be used on suitable flat and smooth surfaces (e.g. tiled surfaces).

Lieferumfang

Haltegriff inkl. 3 Saugteller, gebrauchsfertig.

Product contents

Suction grab bar with 3 suction cups, ready to use.

Montage – Assembling

Saugteller und Untergrund sorgfältig reinigen. Saugteller fest auf den Untergrund drücken. Die Befestigungshebel am Haltegriff müssen geöffnet sein und der ganze Saugteller muss vollflächig auf dem Untergrund aufliegen.

Die Saugteller müssen jeweils komplett auf einer Fliese bzw. dem Untergrund aufliegen, so dass keine Fuge überdeckt wird bzw. die Auflagefläche unterbrochen wird (siehe Bilder unten). Zur Befestigung (Festsaugen der Sauger am Untergrund) Hebel rechts und links am Griff nach oben umlegen. Drücken Sie nun den Haltegriff auf den Untergrund bis beide Haftanzeigen im Anzeigefenster grün (1) zeigen und schließen Sie dann die Hebel durch Drücken nach unten. (2)

Falls die Haftung unzureichend ist, den Haltegriff über die beiden Befestigungshebel lösen und den Griff erneut anbringen.

Wenn eine ausreichende Haftung nicht erzielt wird, darf der Griff nicht benutzt werden !

Clean the vacuum suction discs and the surface thoroughly. Press the rubber discs firmly to the surface. The tilting vacuum levers must be loose at this point and the whole of each rubber disc must lie on the surface.


Ensure that the rubber discs are completely on the surface, and that the discs do not cover any grouting lines or other joints (see pictures below).

Firstly, press the grab bar firmly on the surface to which it is to be secured ensuring that the visual aid for suction is green (photo 1).

To secure the suction cups attached to the end of the bar, press the lever from an upright to a flat position (photo 2). Do this for both sides of the grab bar.

Before each use, test the bar is secure. If the bar is not secure, release the bar and reattach again.


If the required suction power has not been achieved, the bar should not be used !

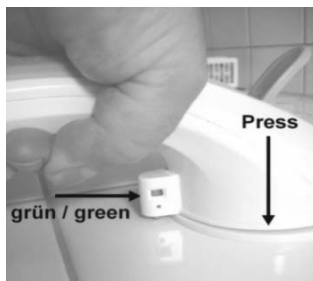



1



2

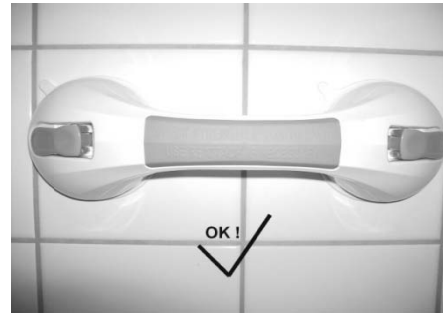

Entfernungshinweise: Um den Haltegriff zu lösen, beide Hebel nach innen umlegen, Haltegriff dabei festhalten! Sauger durch Ziehen an den Laschen lösen.

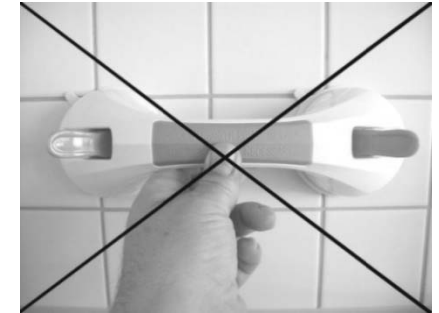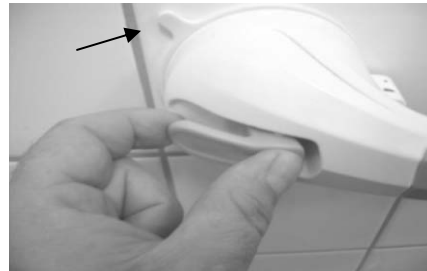

Removal instructions: Release bath latches. Pull the flap to remove the suction cups.



Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

Dieses Produkt wurde konzipiert um Unterstützung zu geben und nicht um das gesamte Gewicht einer Person zu halten oder tragen. Vor der Anbringung des Haltegriffes den Untergrund säubern und trocknen. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung.

Prüfen Sie die ordnungsgemäße Haftung des Griffes vor jeder Benutzung!

Falls der Griff nicht richtig haftet muss er vor jedem Gebrauch neu angebracht / fixiert werden. **Saughaltegriff bei Defekt nicht verwenden!**

Safety Instruction

Attention

*This product is designed to provide support. It is not designed to hold a person's entire body weight. Before using the grab bar, clean and dry the area where the grab bar is to be attached, **and read the instructions carefully.***

Be sure to test the stability of the grab bar before every use.

Always make sure that the grab bar is securely attached before each use and always reattach if loose.

Do not use the suction grab bar if it is damaged

Reinigung

Die Saugteller immer von Öl, Staub und Schmutz frei halten. Zur Reinigung der Sauger haushaltsübliche Reiniger verwenden (kein Essigreiniger).

Cleaning

Always keep the rubber discs free from oil and dust. Clean the rubber discs with standard household detergents (no acetic cleaner).